

HemoCue® Hb 201+ System



El estándar para una precisión constante

Hb 201+

El HemoCue® Hb 201+ System, preciso y fácil de utilizar, se ha convertido en el estándar de las pruebas el punto de atención. Los profesionales sanitarios de todo el mundo necesitan obtener resultados inmediatos para poder tomar las decisiones correctas cuando más lo necesitan, especialmente en el punto de atención.

Gracias a nuestra asistencia y servicios específicos, así como a una exclusiva capacitación basada en más de 40 años de experiencia, puede contar con HemoCue para obtener las soluciones adecuadas para cubrir todas sus necesidades.

Confíe en los resultados obtenidos en cabecera de paciente

- Calibración precisa de fábrica con el método de referencia ICSH.
- Tecnología patentada basada en microcubetas con excelente reproducibilidad entre lotes.
- Registro de fecha y hora para hasta 600 resultados.
- Disponibilidad de controles líquidos a base de sangre.

Acceda fácilmente a una precisión con calidad de laboratorio

- Muestra de sangre total capilar, venosa o arterial.
- Rápida formación y prácticamente no requiere mantenimiento.
- Posibilidad de relacionar el resultado con el ID del paciente para incluirlos en el historial médico.
- Conexión a impresora.

HemoCue® Hb 201+ System

Especificaciones

Principio o Metodología

Reacción de metahemoglobina azídica modificada; doble longitud de onda (570 nm y 880 nm) para compensar la turbidez

Calibración

Calibración de fábrica con el método de referencia ICSH; no necesita calibración adicional

Material de muestra

Sangre total capilar, venosa o arterial

Intervalo de medición

0,5-25,6 g/dL
(5-256 g/L, 0,3-15,9 mmol/L)

Resultados

En menos de 60 segundos

Volumen de la muestra

~10 µL

Dimensiones

160 x 43 x 85 mm

Peso

350 g, pilas incluidas

Temp. de almacenamiento

Analizador: 0-50 °C
Microcubetas: sin abrir a 15-30 °C;
los viales abiertos permanecen estables tres meses

Temp. de funcionamiento

15-30 °C

Alimentación


Adaptador de CA o 4 pilas AA

Conexión


Impresora y HemoCue® Basic Connect™, incluido un lector de códigos de barras opcional

Control de calidad


Autocomprobación integrada; controles líquidos opcionales

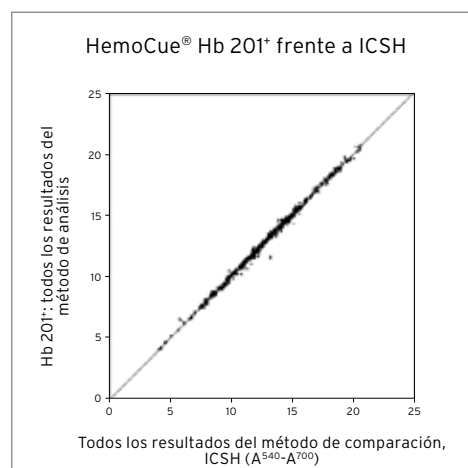

Tres sencillos pasos

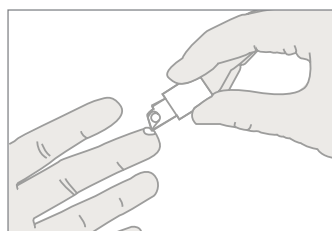

1 Llene la microcubeta.

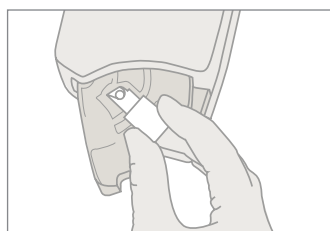

2 Introduzca la microcubeta en el analizador.



3 Visualice los resultados.