

HemoCue® Plasma/Low Hb System



Control de calidad exclusivo para productos sanguíneos

Plasma/Low Hb

El nivel de hemólisis es un indicador clave de la calidad y de la integridad de los productos sanguíneos. La innovación de HemoCue ha establecido el estándar, lo que ha permitido calcular fácilmente y con precisión el nivel de hemólisis.

Gracias a nuestra asistencia y servicios específicos, así como a una exclusiva capacitación basada en más de 40 años de experiencia, puede contar con HemoCue para obtener las soluciones adecuadas para cubrir todas sus necesidades.

Confíe en los resultados obtenidos

- Eliminación de exámenes visuales subjetivos.
- Calibración precisa de fábrica con el método de referencia ICSH.
- Tecnología patentada basada en microcubetas con excelente reproducibilidad entre lotes.
- Disponibilidad de controles líquidos a base de sangre.

Acceda fácilmente a una precisión de los resultados con la calidad de laboratorio

- Plasma, suero, soluciones acuosas o sobrenadante de suspensiones eritrocitarias.
- Facilidad de uso y resultados en un minuto.
- Portabilidad para realizar pruebas en cualquier lugar.

HemoCue® Plasma/Low Hb System

Especificaciones

Principio o Metodología

Reacción de metahemoglobina azídica modificada; doble longitud de onda (570 nm y 880 nm) para compensar la turbidez

Calibración

Calibración de fábrica con el método de referencia ICSH; no necesita calibración adicional

Material de muestra

Soluciones plasmáticas, séricas y acuosas o suspensiones de eritrocitos almacenadas

Intervalo de medición

0,3-30,0 g/L (0,03-3,0 g/dL, 30,0-3000 mg/dL, 0,02-1,86 mmol/L)

Resultados

En menos de 60 segundos

Volumen de la muestra

~20 µL

Dimensiones

160 x 210 x 90 mm

Peso

690 g, pilas incluidas

Temp. de almacenamiento

Analizador: 0-50 °C

Microcubetas: sin abrir a 15-30 °C; los viales abiertos permanecen estables tres meses

Temp. de funcionamiento

15-30 °C


Alimentación

Adaptador de CA o 5 pilas AA


Control de calidad

Dos niveles de control líquidos


Tres sencillos pasos

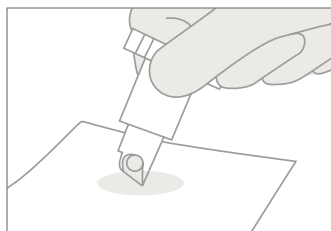

1 Llene la microcubeta.

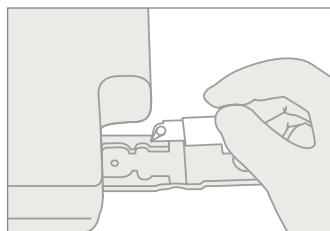

2 Introduzca la microcubeta en el analizador.

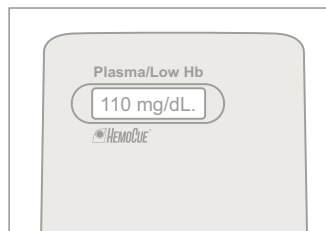

3 Visualice los resultados.