


Accu-Chek® Safe-T Pro Uno fácil de usar, fácil de entender

Ficha técnica

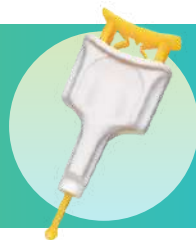

Descripción de artículo

El dispositivo de punción Accu-Chek® Safe T-Pro Uno **se adapta a los exigentes requisitos de higiene de las autoridades sanitarias, las instituciones de salud y una mayor seguridad.** Al mismo tiempo, proporciona un **manejo ergonómico**, de punción en sólo **3 milisegundos**, y características de seguridad que impiden los pinchazos accidentales de aguja. Su profundidad de punción preestablecida lo mantiene listo para su uso inmediato.

Uso previsto

Un solo uso. Se obtiene **una muestra de sangre capilar de la punta del dedo** o, si el paciente es un bebé menor de 1 año, del talón.

Desecho



El dispositivo entero es de un solo uso.



Desechar siempre el dispositivo de punción usado en concordancia con los procedimientos de las instalaciones locales para el manejo de desechos, y con las regulaciones sanitarias del país.



Características



Listo para usar con una **configuración de profundidad predefinida.**



Tecnología Safe-T **garantiza que la aguja esta siempre guardada en forma segura.**



Aguja biselada y de diámetro pequeño para muestreo virtualmente **libre de dolor.**



Ergonómica y fácil de agarrar para un manejo seguro.



Higiénico – cada lanceta solo puede ser usada una vez.



El resguardo de la aguja **previene de pinchazos accidentales.**



Adecuado igualmente para personas que usan la **mano derecha o la izquierda.**




Luego de realizar la punción, **se desecha el dispositivo entero.**

Especificaciones adicionales

- | | |
|--|---|
| • Profundidad de penetración: 1.5 mm | • Uso de una sola vez: Si |
| • Diámetro de la aguja: 0.36 mm (28 G) | • Retración automática de la aguja: Si |
| • Corte especial de la aguja: Corte de 3 caras | • Reconocimiento de dispositivo usado: Si |
| • Aguja siliconizada: Si | • Uso intuitivo: Si |
| • Esterilidad: 4 años de esterilización | • Caja con 200 lancetas. |


Modo de uso del dispositivo de punción Accu-Chek® Safe-T-Pro Uno

1

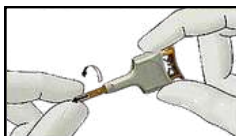

Gire la tapa de esterilidad y
quítela.

2

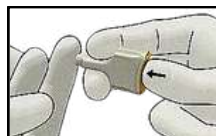

Sostenga el dispositivo de
punción entre su dedo índice, el
dedo medio y el pulgar.

Presione el dispositivo
firmemente contra el sitio de
punción elegido.

Utilizando su dedo pulgar,
presione el botón de liberación
completamente hasta el fondo.

Retire el dispositivo del lugar de
punción y descártelo.