

ACCU-CHEK® Softclix



Sistema de punción Accu-Chek Softclix

ACCU-CHEK®

Características y beneficios

ACCU-CHEK® Softclix

11 profundidades de penetración

Ideal para todo tipo de piel

Práctica función de eyección de lanceta

Cambio de lancetas de forma segura

Tecnología Clixmotion®

Punción prácticamente indolora



Lanceta con corte de 3 caras

Ayuda a evitar lesiones en la piel



Superficie lisa y pulida

Reduce la fricción en la penetración


Tiempo de punción rápido

No toma más de unos milisegundos penetrar la piel

Haz check con
 ACCU-CHEK®

Tecnología Clixmotion


ACCU-CHEK® Softclix

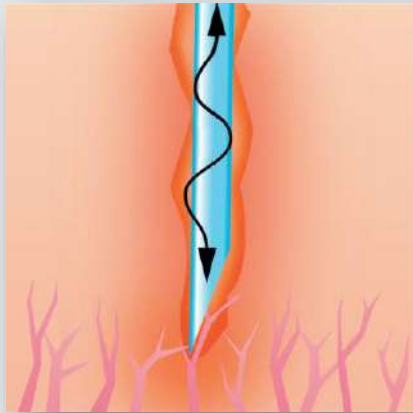

Tecnología Convencional

La vibración causa daño y dolor al tejido.


La lanceta se detiene y se retrae abruptamente.

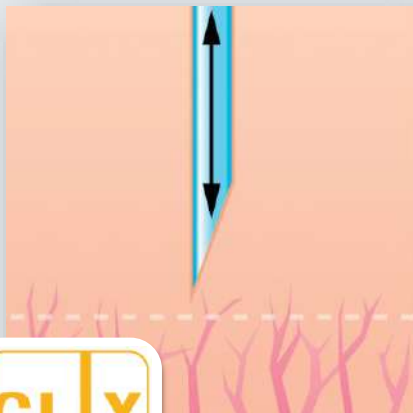

Tecnología Clixmotion

Sin vibración interior o exterior que cause daño o dolor.

La lanceta se detiene suavemente y retrocede de inmediato.

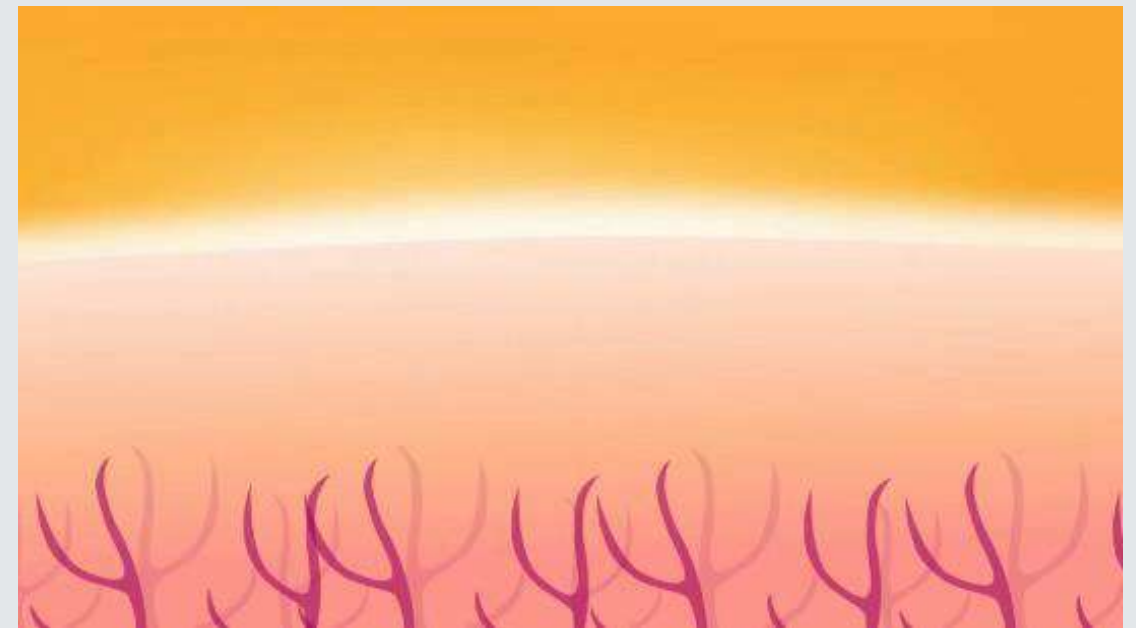

Haz check con
 ACCU-CHEK®

Guía Rápida de Uso

ACCU-CHEK® Softclix

1



Retire el capuchón

4



Vuelva a colocar el capuchón

7



Presione el botón disparador

2



Introduzca una lanceta

5



Elija entre 11 profundidades

8



Eyecte la lanceta y coloque el capuchón

3




Desenrosque el disco protector de la lanceta

6



Presione el botón tensor hasta el tope

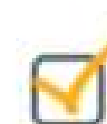Haz check con
 ACCU-CHEK®

Ficha Técnica y Especificaciones

ACCU-CHEK® Softclix

Especificaciones del sistema de punción

Ajuste de profundidad de punción	11 niveles de punción al girar el capuchón
Eyector de lanceta	Sí
Biocompatibilidad	Probado para todos los componentes que pueden entrar en contacto directo con la piel.

Especificaciones de la lanceta

Diámetro	0.4 mm (28G)
Longitud	25.3 mm (28G)
Peso	0.3 g (28G)
Corte	Corte cónico de 3 lados
Libre de látex	Sí
Esterilización	Irradiación gamma
Esterilidad	4 años
Material utilizado	Acero inoxidable de grado médico; recubrimiento de silicona

Haz check con
 ACCU-CHEK®