

ACCU-CHEK® Safe-T-Pro Plus

Roche

La lanceta de un solo uso,
ideal para todo tipo de paciente



Beneficios

Lanceta de alta seguridad
estéril y desechable,
personalizable con 3 niveles de
punción preestablecidos.



Apropiada para **adultos, niños y neonatos**.



Manejo **intuitivo** y fácil
de usar, gracias a su diseño
ergonómico en forma de T.



Extracción fácil con su aguja
de acero inoxidable con corte
cónico de 3 lados, delgada,
estéril y siliconada.
(Diámetro de 0.63 mm, 23G)

3 medidas de profundidad



Profundidad
reducida 1.3 mm

Profundidad
media 1.8 mm

Profundidad
grande 2.3 mm



Mecanismo de seguridad con retracción automática que evita punciones involuntarias y que la lanceta sea utilizada más de una vez.

¿Cómo utilizarlo?



Paso 1

- Dé un giro a la tapa de esterilidad y retírela.
- No utilice el dispositivo si la tapa ha sido previamente retirada ya que la esterilidad puede estar comprometida.



Paso 2

- Con 3 niveles de profundidad ajustables para diferentes grosores de piel y/o tamaños de muestras de sangre.
- La profundidad está preestablecida en medio. Seleccione la profundidad de penetración deseada después de quitar el tapón de esterilidad.



Paso 3

- Presione el botón liberador hasta el fondo del dispositivo con firmeza sobre el sitio elegido para realizar la punción para obtener la muestra.

¡Importante! Desecha las lancetas usadas según las normas locales vigentes.

Material de apoyo para el profesional de la salud. Lea las instrucciones de uso.

REFERENCIAS: 1. Roche Diabetes Care. (2019). Instrucciones de uso. Accu-Chek® Safe-T-Pro Plus. Alemania. www.accu-chek.com

Accu-Chek® Safe-T-Pro Plus® Reg. No2489E2011 SSA • **Aviso de publicidad:** 2315112002C02570 • **No. de material:** 9422374001

©2022 Roche DC México, S.A. de C.V. Accu-Chek® Safe T Pro Plus® es una marca comercial registrada propiedad de Roche Diabetes Care GMBH. Roché es una marca registrada propiedad de Roche International LTD.